

LEESMIJ - IOPI®-rapportgeneratorsoftware

Softwareaccessoire voor gebruik met de IOPI Pro- en Trainer-hulpmiddelen - Versie 1.0.2.0

VEREISTEN BESTURINGSSYSTEEM

Deze toepassing is bedoeld te werken op:

- Windows 11-besturingssysteem of Windows 10-besturingssysteem dat nog door Microsoft ondersteund wordt
- Vereist .NET Framework 4.8 (als dit niet standaard geïnstalleerd is, gaat u naar <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> en installeert u de runtime)

SNEL STARTEN

Plaats de meegeleverde USB-stick in uw computer en klik op: : **IOPI® Report Generator Quick Start**.

DOCUMENTATIE BEKIJKEN

De volledige gebruiksaanwijzing voor de IOPI®-rapportgeneratorsoftware is beschikbaar in elektronische vorm als onderdeel van de software. Het LEESMIJ-bestand, de gebruikershandleiding en de licentieovereenkomst voor de IOPI®-rapportgenerator kunnen bekeken worden door op de knoppen **LEESMIJ**, **Gebruikershandleiding**, of **Licentieovereenkomst** te klikken in het venster Snel starten.

Neem contact op met uw distributeur of met IOPI Medical voor een papieren exemplaar van de gebruikershandleiding voor de rapportgenerator.

IOPI®-RAPPORTGENERATOR

Installatie

Klik op de knop **IOPI®-rapportgenerator installeren** in het venster Snel starten en volg de installatie-instructies.

Uitvoeren vanaf de USB-stick

Deze procedure kan noodzakelijk zijn wanneer de gebruiker niet gemachtigd is een programma direct op een computer te installeren. Alle programmabestanden blijven op de geleverde USB-stick staan.

Klik op de knop **IOPI®-rapportgenerator uitvoeren vanaf USB** in het venster Snel starten.

FTDI-STUURPROGRAMMA

Voor de Serie 3-apparaten van IOPI is een stuurprogramma van FTDI vereist. Dit stuurprogramma bevindt zich misschien al op een Windows 10- of Windows 11-computer of kan automatisch gedownload worden. Als u verbindingsproblemen ondervindt, heeft de computer waarschijnlijk niet het juiste stuurprogramma. Volg de instructies hieronder om het FTDI-stuurprogramma handmatig te installeren.

Klik op de knop **FTDI-stuurprogramma bijwerken** in het venster Snel starten en volg de instructies. Geüpdatete stuurprogramma's zijn mogelijk beschikbaar op de FTDI-website <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers>. Let op dat een 'bij installatie uitvoerbare' versie vereist is.

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072 VS

Telefoon: +1 (425) 549-0139
E-mail: info@iopimedical.com
Website: www.IOPIMedical.com